

VIS DE CICATRISATION TBR®


Profil des vis de cicatrisation		8			M		
		Ø3.5	Ø4	Ø5	Ø3.2	Ø3.9	Ø4.7
Z							
BL							

Caractéristiques :


- Livrée non stérile
- Usage unique

Matériels compatibles

Tournevis manuels hexagonaux

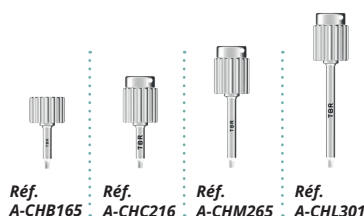

Indication du marquage laser

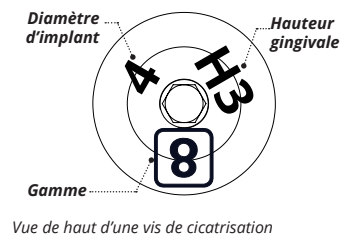


Toutes les références sont disponibles dans les catalogues produits TBR - Z-FZ1 & Z-FBONELEVEL. Conditionnement : Sachet individuel muni de 3 étiquettes de traçabilité détachables et repositionnables.

Utilisation de la vis de cicatrisation TBR®

Choisir la vis de cicatrisation TBR adaptée à la gamme, aux dimensions de l'implant et à l'hauteur de la gencive. Les vis de cicatrisation doivent être placées en sous occlusion.


• Cas pour les implants Tissue Level (TL) **8** & **M**

Dévisser et retirer la vis de couverture à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

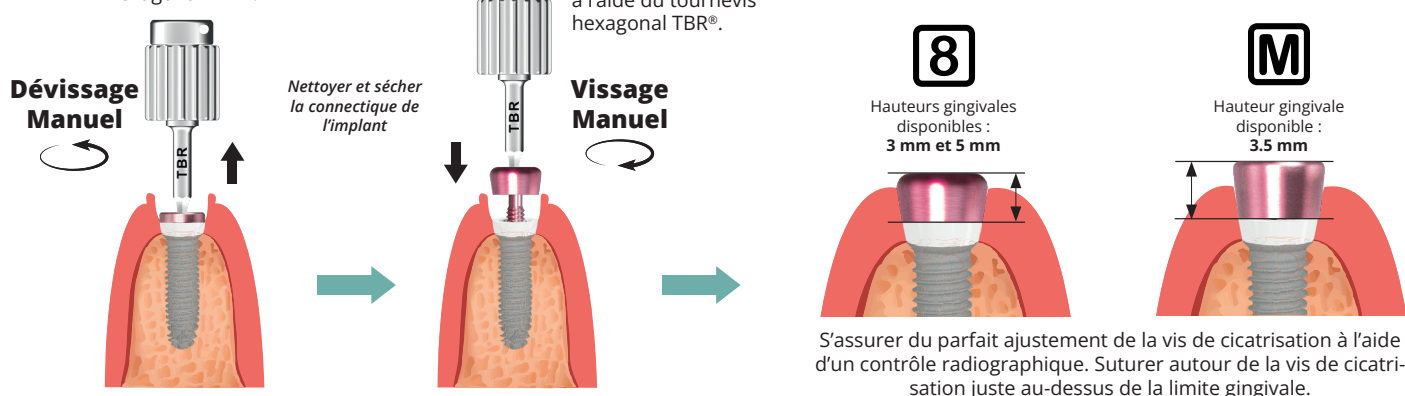

• Cas pour les implants Bone Level (BL) **8** & **M**

Dévisser et retirer la vis de couverture ou la vis de cicatrisation à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

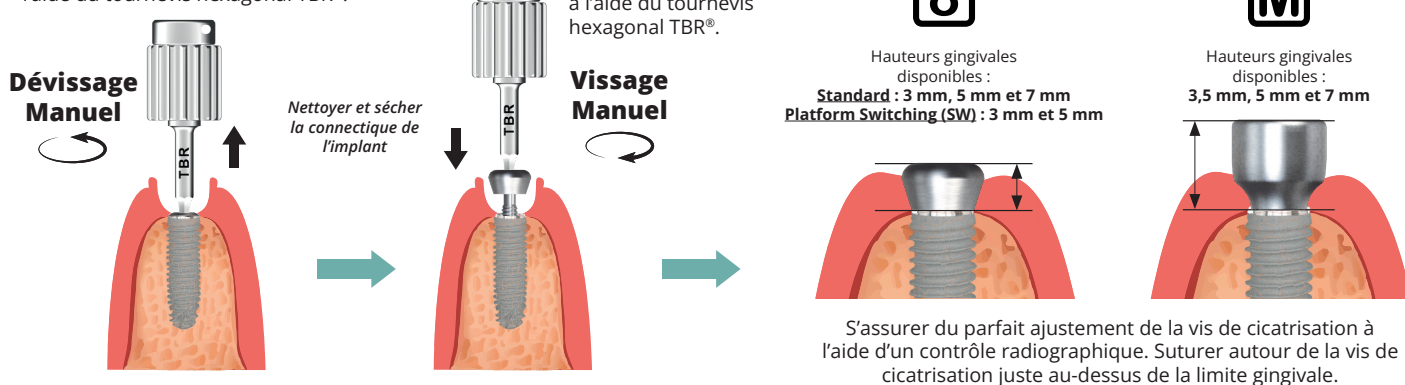


Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation des vis et coiffes de cicatrisation TBR® - Réf. C-NOTP501 - disponible sur ifu.tbr.dental.

COIFFE DE CICATRISATION TBR®


Profil des coiffes de cicatrisation			Caractéristiques : - Livrée non stérile - Usage unique
	8 M		
	Ø3.5 - Ø3.2	Ø4 - Ø3.9	
Z			
BL			

Matériels compatibles

Tournevis manuels hexagonaux

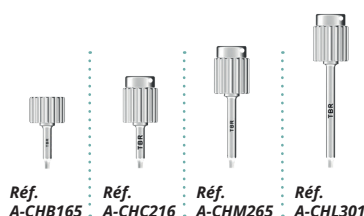

Indication du marquage laser

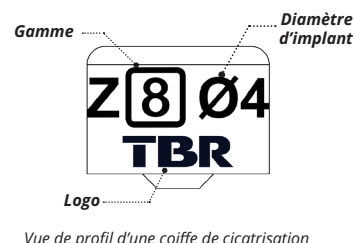

Toutes les références sont disponibles dans les catalogues produits TBR - Z-FZ1 & Z-FBONELEVEL. Conditionnement : Sachet individuel muni de 3 étiquettes de traçabilité détachables et repositionnables.

Utilisation de la coiffe de cicatrisation TBR®

Choisir la coiffe de cicatrisation TBR adaptée à la gamme et aux dimensions de l'implant. Les coiffes de cicatrisation doivent être placées sur l'embase titane des piliers Multi-Unit en sous occlusion.

• Cas pour les implants Tissue Level (TL) **8** & **M**

Dévisser et retirer la vis de couverture à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

Dévisage Manuel

Visser l'embase titane du pilier Multi-Unit TBR® droit à l'aide du mandrin pour pilier Multi-Unit TBR®. (Réf. A-MPC103 [court] ou Réf. A-MPC198 [Long]).

Vissage à 30 N.cm

Nettoyer et sécher la connectique de l'implant

Visser la coiffe de cicatrisation à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

Vissage Manuel

Nettoyer et sécher la partie coronaire de l'embase Multi-Unit

8 **M**

Hauteur gingivale disponible : 3.5 mm

S'assurer du parfait ajustement de la coiffe de cicatrisation à l'aide d'un contrôle radiographique. Suturez autour de la coiffe de cicatrisation juste au-dessus de la limite gingivale.

• Cas pour les implants Bone Level (BL) **8** & **M**

Dévisser et retirer la vis de couverture ou la vis de cicatrisation à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

Dévisage Manuel

Visser l'embase titane du pilier Multi-Unit TBR® droit ou angulé à l'aide du mandrin pour pilier Multi-Unit TBR®. (Réf. A-MPC103 [court] ou Réf. A-MPC198 [Long]).

Vissage à 30 N.cm

Nettoyer et sécher la connectique de l'implant

Visser la coiffe de cicatrisation à l'aide du tournevis hexagonal TBR®.

Vissage Manuel

Nettoyer et sécher la partie coronaire de l'embase Multi-Unit

8 **M**

Hauteur gingivale disponible : 2.5 mm

S'assurer du parfait ajustement de la coiffe de cicatrisation à l'aide d'un contrôle radiographique. Suturez autour de la coiffe de cicatrisation juste au-dessus de la limite gingivale.

Se référer à la notice des piliers Multi-Unit droits Réf. C-NOTP504, à celle des piliers piliers Multi-Unit angulés Réf. C-NOTP505, le cas échéant, et/ou à leurs protocoles respectifs Réf. P-FRP504 et Réf. P-FRP505 pour la pose étape par étape des piliers Multi-Unit droits ou angulés.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation des vis et coiffes de cicatrisation TBR® - Réf. C-NOTP501 - disponible sur ifu.tbr.dental.