

DESCRIPTION & AVANTAGES

En complément de votre trousse chirurgicale pour implants à connexion octogonale **8** ou implants à connexion cône morse **M**, vous disposez désormais d'une trousse de 4 forets et 20 butées amovibles.

■ Fiabilité de la séquence de forage


La butée empêche le foret d'atteindre une profondeur non souhaitée.

■ Système de rétention par friction

Les forets spécifiques accueillent les butées par simple clipsage.

■ Sécurité

Facilement nettoyable et stérilisable à l'autoclave.

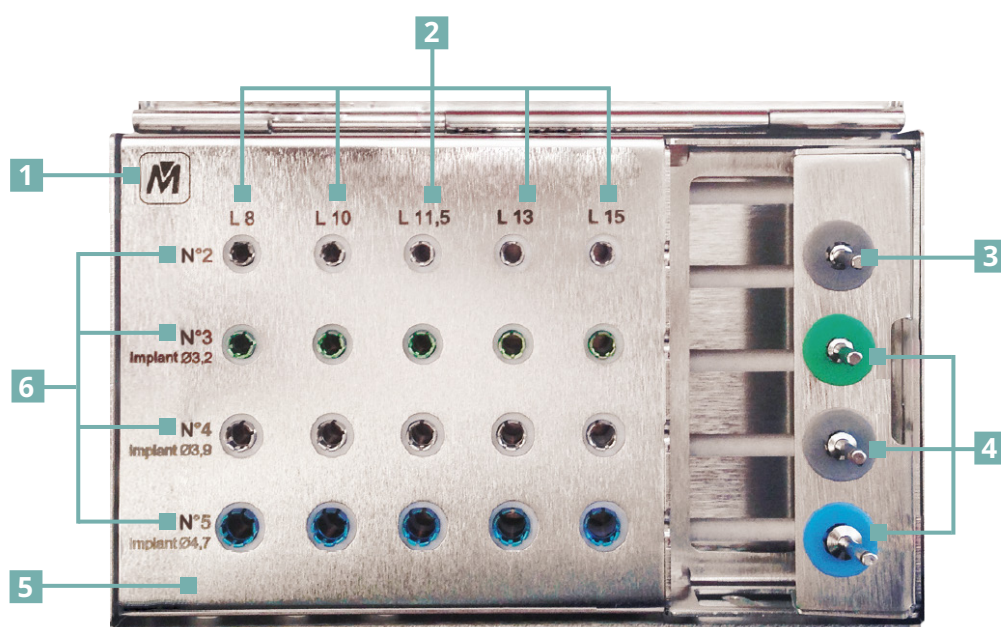

- 1 Gamme implantaire
- 2 Choix de la longueur de l'implant à poser
- 3 Foret N°2 intermédiaire
- 4 Séquence de forets selon le diamètre de l'implant à poser
- Ø3.2/3.5 => Foret N°3,
- Ø3.9/4 => Foret N°3, N°4
- Ø4.7/5 => Foret N°3, N°4, N°5
- 5 Coffret Inox chirurgical stérilisable 134°/18 min
- 6 Séquence des butées amovibles à utiliser

M Réf. A-TF004
implants M

8 Réf. A-TF003
implants Connect

8 Réf. A-TF005
implants infinity



Protocole valable uniquement avec l'utilisation du contre-angle

UTILISATION DE LA TROUSSE DE BUTÉES AMOVIBLES

- 1 Faire pivoter la partie d'emplacement des forets afin d'appréhender les forets.
- 2 Se munir du contre-angle dont vous disposez.
- 3 Sélectionner les forets adaptés aux dimensions de l'implant à poser selon l'exemple suivant :

EXEMPLE : Pose d'un implant de Ø3.9 et de longueur 13 mm

Une fois le passage du foret pointeur et du foret N°1 (ces forets sont disponibles dans votre trousse chirurgicale ou au détail), commencer la séquence de chaque forage avec l'aide des butées.


FORET N°2 Se munir du foret N°2 intermédiaire avec l'aide du contre-angle et clipser la butée correspondante.



FORET N°3 Continuer la séquence de forage en prenant le foret N°3 avec la butée correspondante.



FORET N°4 Finir la séquence de forage avec l'utilisation du dernier foret N°4 et de la dernière butée au diamètre correspondant de l'implant.

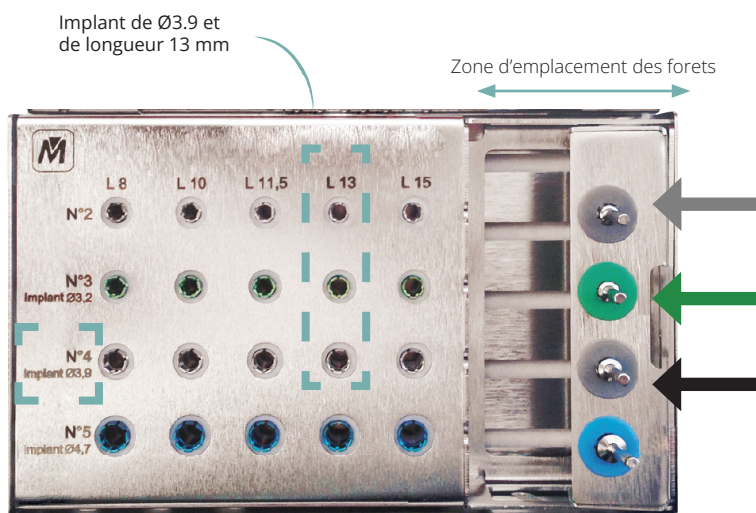

Nota Bene : Protocole identique pour les trousses de butées amovibles de pose d'implant à connexion octogonale (Gamme 8 et infinity)