

MONCONI MULTI-UNIT ANGOLATI TBR®

Profili dei pilastri angolari Multi-Unit

Connessione	Impianti Bone Level BL	
	8	M
Vite secondaria	Rif. VIM045	
Rappresen- tazione delle guaine caldabili		
Rappresen- tazione del cono in titanio		
Vite primaria	Rif. VIMC045	Rif. VIMC044
Rappresen- tazione e delle basi angolate Multi-Unit		
Ø emergenza della base (mm)	5	
Angolazione (°)	20 - 30	

Caratteristiche:

- Fornito non sterile
- Monouso

Strumenti compatibili

Cacciaviti
manuali
esagonali

Rif. A-CHL301
Rif. A-CHM265
Rif. A-CHC216
Rif. A-CHB165

4 Lunghezze disponibili

Mandri
esagonali
per chiave
dinamometrica

Rif. A-ME006
Rif. A-ME007

2 Lunghezze disponibili

Mandri per
pilastri
Multi-Unit
per chiave
dinamometrica

Rif. A-MPC198
Rif. A-MPC103

2 Lunghezze disponibili

Tutti i riferimenti sono disponibili nel catalogo prodotti TBR - Z-IBONELEVEL.

Confezione: bustina singola con 3 etichette di tracciabilità staccabili e riposizionabili. I monconi Multi-Unit angolati sono forniti con 4 viti: 2 viti da laboratorio e 2 viti definitive.

Utilizzo dei monconi Multi-Unit angolati TBR®


La scelta del moncone Multi-Unit angolato TBR® dipende dalla gamma dell'impianto dentale TBR® inserito, dal diametro e dall'angolazione dell'impianto.

Posizionamento della base angolata in titanio e del cono in titanio Multi-Unit TBR®

• Impianti Bone Level (BL) **8** e **M**

Svitare e rimuovere la vite di copertura o la vite di guarigione utilizzando il cacciavite esagonale TBR®.

**Svitamento
manuale**

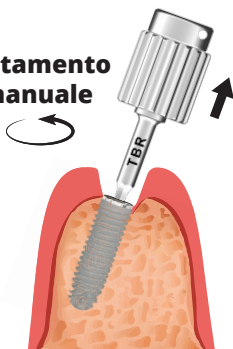

Individuare e scegliere l'orientamento corretto della base angolata in titanio Multi-Unit TBR® sull'impianto. Posizionare ed avvitare la vite primaria di assemblaggio definitiva della base angolata in titanio utilizzando il cacciavite esagonale TBR®.


*Pulire ed asciugare il
connessione
dell'impianto*

**Avvitamento
manuale**




Serrare la vite di assemblaggio primaria della base angolata in titanio a 30 N.cm utilizzando il mandrino esagonale TBR® e la relativa chiave dinamometrica.

**Serraggio a
30 N.cm**

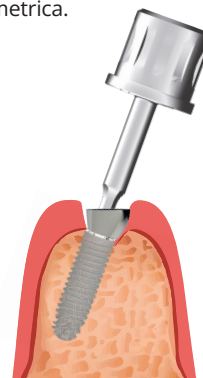


Posizionare il cono in titanio Multi-Unit TBR® utilizzando il mandrino per moncone Multi-Unit.

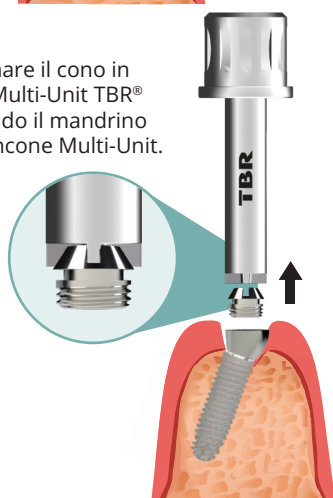

Avvitare il cono in titanio (serraggio manuale) utilizzando il mandrino per moncone Multi-Unit.

**Serraggio
manuale**

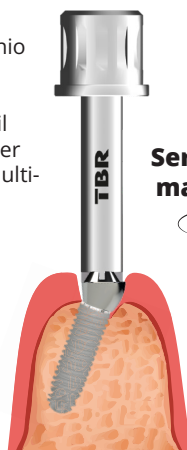

8

M

Angolazioni disponibili:
20° e 30°



Verificare il perfetto adattamento del moncone Multi-Unit angolato mediante controllo radiografico.

Applicazione della cappetta di guarigione per monconi Multi-Unit angolati TBR®


Fare riferimento alle istruzioni per l'uso degli elementi di guarigione **Rif. C-NOTP501** e/o al protocollo per gli elementi di guarigione **Rif. P-FRP501** per l'applicazione passo dopo passo delle cappette di guarigione per monconi Multi-Unit angolati TBR® (Caso per impianti Bone Level (BL) **8** e **M**).

Posizionamento della riabilitazione protesica sui monconi Multi-Unit angolati TBR®

Pulire e sterilizzare la riabilitazione protesica e le viti protesiche definitive. Verificare le raccomandazioni dei produttori dei materiali per quanto riguarda la compatibilità con il metodo di sterilizzazione.

• Impianti Bone Level (BL) **8** e **M**

Svitare le cappette di guarigione dalle basi Multi-Unit utilizzando il cacciavite esagonale TBR®.

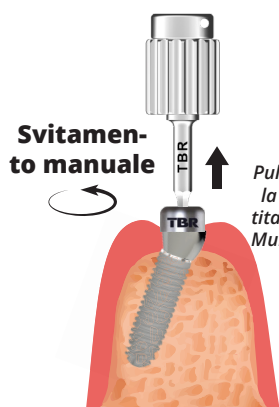

Pulire ed asciugare la connessione in titanio dei monconi Multi-Unit angolati.




Posizionare la protesi definitiva sulle basi Multi-Unit ed inserire le viti secondarie definitive utilizzando il cacciavite esagonale TBR®.



Serrare le viti secondarie definitive utilizzando il mandrino esagonale TBR® e la relativa chiave dinamometrica.

Serraggio a 30 N.cm

8 M

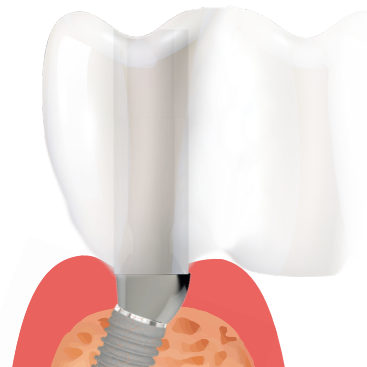

Proteggere le teste delle viti e chiudere i fori di avvitamento.

Caso di manutenzione della base angolata Multi-Unit TBR® - gamma **M**

Durante la manutenzione delle basi Multi-Unit TBR® della gamma M, dopo aver rimosso la riabilitazione protesica ed il cono in titanio Multi-Unit TBR®, svitare e rimuovere la vite primaria dal suo alloggiamento utilizzando il mandrino esagonale TBR® e la chiave dinamometrica.



Svitamento 30 N.cm

A causa della connessione cono Morse tra l'impianto e la base Multi-Unit TBR®, anche quando la vite primaria viene rimossa, il cono Morse rimane attivato.



Per poter disattivare il cono Morse della base Multi-Unit TBR® dall'impianto, utilizzare il calibro di parallelismo **Rif. A-JAU355**.

Incluso nel kit chirurgico TBR® **Rif. A-TCP008** ed inserirlo nella base Multi-Unit TBR®. Mantenere il calibro di parallelismo, quindi procedere con movimenti avanti e indietro del calibro nella base Multi-Unit TBR®.

La base Multi-Unit TBR® si staccherà dall'impianto e il cono Morse si disattiverà.

Elaborazione della riabilitazione protesica (esclusivamente per il laboratorio odontotecnico)

Una guaina calcinabile viene fornita con ogni base di moncone Multi-Unit angolato. Questa guaina calcinabile consente di progettare la riabilitazione protesica definitiva*.

Utilizzare le guaine calcinabili per guidare l'aggiunta di cera prima della fusione**. Utilizzare le viti da laboratorio e conservare le viti definitive per l'uso in bocca.



Rif. GP500

*Sono disponibili anche guaine in TITANIO o PEEK per riabilitazioni protesiche definitive o provvisorie con metodo digitale, vendute singolarmente. Consultare il catalogo Z-IBONELEVEL.
**Informarsi sulle raccomandazioni dei produttori dei materiali relative al protocollo di fusione.