

		Foret Pointeur	Forets N°1 à butée					Foret conique N°2	Foret conique N°3	Foret conique N°4	Foret conique N°5	Tarauds			Alésoirs		
			L. 8 mm	L. 10/10.5 mm	L. 11.5 mm	L. 13 mm	L. 15/15.5 mm					Ø3.2 / Ø3.5	Ø3.9 / Ø4	Ø4.7 / Ø5	Ø3.2 / Ø3.5	Ø3.9 / Ø4	Ø4.7 / Ø5
NOMBRE D'UTILISATION DES FORETS	Numero de lot																
	1°																
	2°																
	3°																
	4°																
	5°																
	6°																
	7°																
	8°																
	9°																
10°	Pour un forage optimal, remplacer impérativement vos forets.																

NOMBRE D'UTILISATION DES FORETS	Numero de lot																
	1°																
	2°																
	3°																
	4°																
	5°																
	6°																
	7°																
	8°																
	9°																
10°	Pour un forage optimal, remplacer impérativement vos forets.																


X Cochez à chaque stérilisation effectuée
 Cochez 2 fois s'il y a usure prématurée du foret suite aux conditions cliniques (ex : os dense, corticale dure, etc.).



Compatible avec tous les implants TBR de la gamme tissu level ou bone level : Z1-M / M / Z1-Infinity / Infinity / Z1-Connect / Connect

MODE D'EMPLOI

Comment remplir votre Fiche de Suivi d'utilisation de vos forets ?

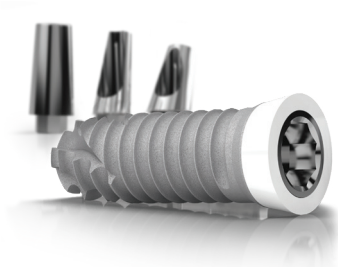

FICHE DE SUIVI Utilisation de la séquence chirurgicale

NOMBRE D'UTILISATION DES FORETS	Foret Pointeur	Forets N°1 à butée					Foret conique N°2	Foret conique N°3	Foret conique N°4	Foret conique N°5	Tarauds			Alésoirs		
		L. 8 mm	L. 10/10.5 mm	L. 11.5 mm	L. 13 mm	L. 15/15.5 mm					03.2 / 03.5	03.9 / 04	04.7 / 05	03.2 / 03.5	03.9 / 04	04.7 / 05
1'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4'		X	X		X	X	X			X						
5'		X			X		X									
6'		X			X		X									
7'					X											
8'					X											
9'					X											
10'					X											

Pour un forage optimal, remplacer impérativement vos forets.

NOMBRE D'UTILISATION DES FORETS	Foret Pointeur	Forets N°1 à butée					Foret conique N°2	Foret conique N°3	Foret conique N°4	Foret conique N°5	Tarauds			Alésoirs		
		L. 8 mm	L. 10/10.5 mm	L. 11.5 mm	L. 13 mm	L. 15/15.5 mm					03.2 / 03.5	03.9 / 04	04.7 / 05	03.2 / 03.5	03.9 / 04	04.7 / 05
1'					X											
2'					X											
3'					X											
4'																
5'																
6'																
7'																
8'																
9'																
10'																

Pour un forage optimal, remplacer impérativement vos forets.

X Cochez à chaque stérilisation effectuée
Cochez 2 fois s'il y a usure prématurée du foret suite aux conditions cliniques (ex : os dense, corticale dure, etc.).

Version : 06/2019 - Ed. 01



Compatible avec tous les implants TBR de la gamme tissue level ou bone level : Z1-M / M / Z1-Infinity / Infinity / Z1-Connect / Connect



Compatible avec tous les implants TBR de la gamme tissue level ou bone level : Z1-M / M / Z1-Infinity / Infinity / Z1-Connect / Connect

Numéro de lot de la trousse chirurgicale ou de l'ancillaire

Usure normale du foret [1 case cochée]

Usure prématurée du foret [2 cases cochées]

Numéro de lot du foret renouvelé

X Cochez à chaque stérilisation effectuée
Cochez 2 fois s'il y a usure prématurée du foret suite aux conditions cliniques (ex : os dense, corticale dure, etc.).